


全能微針導入儀器 Pro 雙重功效


JEAN D'ARCEL
TECHNOLOGIE

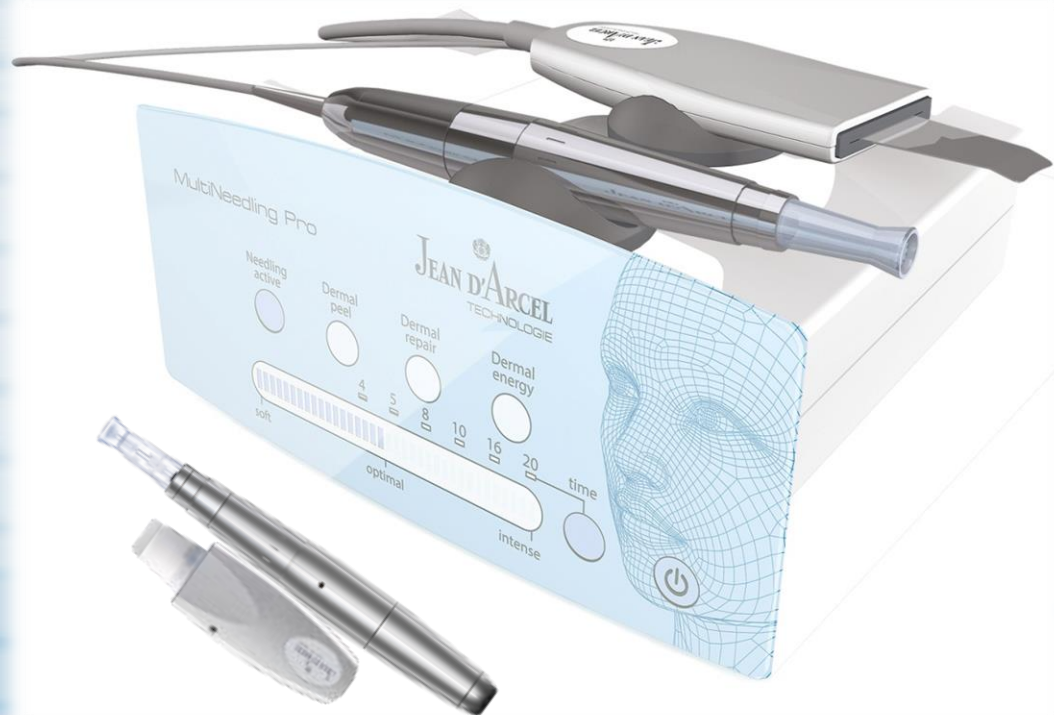

Medical Beauty



Health
made in Germany
健康 - 德國製造




BEAUTY IS OUR PROFESSION

Jean D'Arcel全能微針導入儀器Pro™是一個革命性的微針設備, 用作收緊, 提昇和喚醒肌膚。

Jean D'Arcel全能微針導入儀器Pro™可以明顯改善皮膚外觀:



- 細紋
- 皺紋
- 外科治療、痙瘡及外傷疤痕
- 妊娠紋
- 暗啞膚色
- 減細毛孔

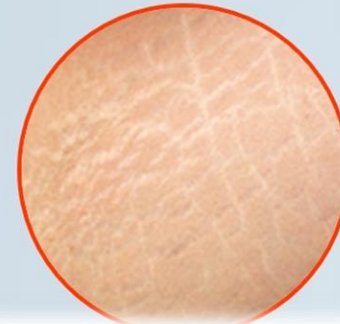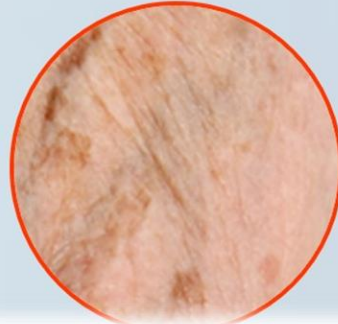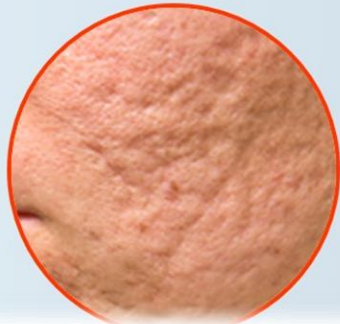

微針導入Pro的原理?

- 利用一個裝有多枝微針的探頭刺入表皮開啟微細管道。皮膚的自然保護功能亦能維持。
- 微針探頭自動地上下移動，從而，似打印方式可精確及均勻地滲透到表皮。過程**完全無痛**，溫和亦快速。
- 可配合Jean D'Arcel 以下安瓿 產品使用：
醫學美肌提升修護精華，**透明質酸推助精華**，**透明質酸³補充精華**，等....直接穿透和均勻到肌膚。利用此微針射頻技術，以上精華便能更有效在皮膚的深層結構發揮其作用。
- 可提供兩種不同微針探頭，塑膠以及不銹鋼針。

微針導入Pro 可適合用於以下部位:

- 面部
- 頸部
- 肩部
- 手背
- 用於眼部可明顯減淡皺紋



微針導入Pro 使用方法

步驟 1:

用溫和洗面乳或洗面啫喱清潔面部或用處。使用非加脂劑的產品進行清洗。

步驟 2:

為強化皮膚再生，因應個人需要以及膚質去進行溫和去角質程序，例如用較溫和的果酸或酵素，不會令皮膚乾旱敏感。請確保在開始療程之前徹底消除在皮膚上所有晶體。

步驟 3:

在開始微針導入療程前，請美容師必須帶上即棄手套保護其及用者安全和衛生。每次療程從無菌獨立包裝內拿出全新的微針探頭裝併到微針手控儀器上。

微針導入療程時間表

為最有效的療程，首先，6 到 12次 是必需的(要視乎皮膚類型)。

一周約兩次。

完成後，可每隔 4 到 5 周為定期療程以維持長期的作用。



附加深層去角質功能:

此功能是, 利用美容儀鐵鏟部分接送低頻超聲波到皮膚上。

好像皮膚沐浴於無感染超聲波之中, 其中特別之處為其超聲波震動功能可完全將剩餘的粒子去除潔淨肌膚。

功效:

配合Jean D'Arcel 產品“去角質爽膚水”使用, 可去除

- 化妝殘留
- 多餘角質
- 壞死細胞
- 結痂
- 輕輕及徹底地去除產品殘留物



療程及產品之配合

微計療程 – 在多個不同療程中的其中一項:

- 潔淨:** 可用所有Jean D'Arcel 潔淨劑 除了醫學美肌溫和潔面卸妝油
- 去角質:** 各種Jean D'Arcel 去角質產品, 如有特別需要,可用**醫學美肌** AHA neutralization
- 深層去角質:** Exfoliating tonic + Dermal Tonic Spray 去角質爽膚水+ 醫學美肌保濕爽膚噴霧
- 微計療程前:** 視乎不同肌膚, 單核活性精華
沒有香料, 著色劑, 聚乙二醇

- * Dermal Lift Repair Concentrate 醫學美肌提升修護精華 **最新推出**
- * Dermal Hyaluron Booster Concentrate 醫學美肌透明質酸推助精華 **最新推出**
- * Dermal Hyaluron Filler Concentrate 醫學美肌透明質酸³補充精華 **最新推出**
- * Dermal Mimic Lift Concentrate 醫學美肌模仿提升精華 **最新推出**

進行微計療程: Dermal Hyaluron5 Gel [5-fold 醫學美肌透明質酸⁵凝膠 [5-倍 **最新推出**

微計療程 後: Dermal Cooling Mask 醫學美肌冷凍面膜-**最新推出**
Dermal Power Peptide Mask 胜肽能量面膜

完結療程 後: ARCELMED, Miratense , Renovar, Sensitive

輔助: Dermal Ultrasonic Contact Gel 醫學美肌超聲波接觸凝膠 [含蘆薈**最新推出**

在進行微針導入療程時即時現場實證

我們的微針導入Pro超然成果在獨立研究中得到證實。以下是有關治療前後成果實證，以及是測試者的真實經驗報告。



治療前 治療後



治療前 治療後



治療前 治療後



此乃配合全能微針導入儀器 Pro和
醫學美容產品，療程前後的成果

Medical Beauty Expertise



VOR DER BEHANDLUNG

療程前



NACH NUR ZWEI BEHANDLUNGEN

經過2次療程後



此乃配合全能微針導入儀器 Pro和
醫學美容產品，療程前後的成果

Medical Beauty Expertise



兩頰治療

Chin treatment

療程前

經過2次療程後



此乃配合全能微針導入儀器 Pro和
醫學美容產品，療程前後的成果

Medical Beauty Expertise



暗瘡傷疤療程 acne-scarring treatment

療程前

後

經過4次療程



此乃配合全能微針導入儀器 Pro和
醫學美容產品，療程前後的成果

Medical Beauty Expertise



膚色改善療程
Pigmentation treatment

療程前

經過4次療程後



Designed,
developed and
made in Germany
全由德國設計,研發及製造


JEAN D'ARCEL
TECHNOLOGIE



相比同類產品,
Jean D'Arzel 全能微針導入儀器Pro :

- 更確切
- 更溫和
- 更有效

Medical Beauty



全能微針導入儀器pro
由Christoph Walenda 誠意推介

BEAUTY IS OUR PROFESSION